

Alkohol alapú felületfertőtlenítő szerek helyes használata



Fertőtlenítőszerral átitatt törölkendő

Azonnal alkalmazható.



Felhasználásra kész oldat

Öntse az oldatot egyszer használatos törölkendőre!



Felhasználásra kész hab

Fújja a habot közvetlenül a felületre vagy egy egyszer használatos törölkendőre!

Használat

HELYES:

- ✓ Fertőtlenítés előtt távolítsa el a látható szennyeződéseket a felületről
- ✓ Egyenletesen nedvesítve be a felületet a szerrel
- ✓ Várja meg, amíg a fertőtlenítőszert teljesen megszárad a felületre
- ✓ Iktassa ki a tűzveszélyes eszközöket és biztosítson megfelelő szellőzést, mert a termék a magas alkoholtartalom miatt gyúlékony
- ✓ Használat után a kendőt dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe
- ✓ Használat után azonnal zárja vissza a terméket

TILOS:

- ✗ A fertőtlenítőszert hígítása
- ✗ A padló ill. nagyobb felületek alkoholtartalmú termékkel történő fertőtlenítése
- ✗ A felületfertőtlenítő termékek kézfertőtlenítésre való használata
- ✗ A nem megfelelő mértékű benedvesítés
- ✗ A felületek szárazon való áttörése
- ✗ A fertőtlenítőszert bejuttatása a műszerek, eszközök belsejébe

Termékek

A gyors felületfertőtlenítő termékeknél alapvető elvárás a baktericid, a yeasticid és a burokkal rendelkező vírusok (pl. a HIV-, az Influenza- és a Koronavírus) elleni hatékonyság.



Magas alkoholtartalmú termékek

Kizárólag alkoholálló felületekre ajánlott. (Nem használható pl. akril vagy plexi felületeken.)



Fertőtlenítőszerral átitattott törölkendő:

- Bacillol® Tissues

Felhasználásra kész oldat

- Bacillol® AF

Alacsony alkoholtartalmú termékek

Alkoholra érzékeny felületekre is használható (pl. monitorok, kijelzők, billentyűzetek).



Fertőtlenítőszerral átitattott törölkendő

- Bacillol® 30 Tissues

Felhasználásra kész oldat

- Bacillol® 30 Foam



Research for
infection protection
bode-science-center.com

bode.hu • missionprevention.hu
hartmann.hu • sterillium.hu



hartmannwebshop.hu

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy,
Paul Hartmann utca. 8.



HARTMANN
Magyarország



Az egészségügy
élvonalában

A FERTŐTLENÍTŐSZER ALKALMAZÁSÁKOR ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA!
HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT!