

The Hartmann logo consists of the word "HARTMANN" in white, uppercase letters inside a dark blue oval. To the right of the oval is a white cross symbol on a red square background, which is a common medical symbol.

O krok dál  
pro zdraví

# Instrukce pro správné použití ústenek **Foliodress® Mask**

1. Umyjte si ruce.
2. Uchopte masku v její centrální části, nedotýkejte se vnitřní vrstvy ústenky (barevná strana je vždy vnější).
3. Nasadte masku na nos a upravte ji tak, aby přilnula k obličeji.
4. Zavažte horní úvazky masky.
5. Uchopením dolních úvazků roztáhněte masku a poté je zavažte.
6. Pro dosažení správné těsnosti upravte masku opět v oblasti nosu.
7. Po sundání ústenky si umyjte ruce.

## Kdy měnit ústenku?

- Každé 3 hodiny
- Po každém operačním výkonu
- Při každém opuštění operačních sálů
- Pokud dojde k její kontaminaci z vnější strany
- Během operačního výkonu, pokud je maska mokrá