

Fixieren mit ...

Handelsformen	Grösse/Breite	Artikelnr.	PZN	Packungsinhalt
Peha-haft® latexfrei Rollen, gedehnt 20 m lang, lose in Kartons	8 cm	932 448	03544232	1 Rolle
	10 cm	932 449	03544338	1 Rolle
	12 cm	932 450	03544373	1 Rolle
Peha-haft® latexfrei Rollen, gedehnt 20 m lang, lose in Kartons	6 cm	932 437	03544858	6 Rollen
	8 cm	932 438	03544864	6 Rollen
	10 cm	932 439	03544887	6 Rollen
Pütter®Flex gedehnt 5 m lang, einzeln in Faltschachteln	8 cm	931 828	03541251	1 Binde
	10 cm	931 829	03541268	1 Binde
Pütter®Flex gedehnt 5 m lang, lose in Kartons	8 cm	931 832	03542380	10 Binden
	10 cm	931 833	03542397	10 Binden
Pütter®Flex Duo gedehnt 5 m lang, 2 Binden in Faltschachteln	10 cm	931 826	03541239	2 Binden
	8/10 cm	931 825	06187011	2 Binden
Rolta® soft einzeln banderoliert, 3 m lang	10 cm	932 045	04456524	6 Binden
	10 cm	932 049	02757457	30 Binden

(0615) 086 254/5



HydroTac®

Einfach fixieren,
mehrfach profitieren.



PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Germany



Besuchen Sie uns im Internet
www.hydro-therapy.de



HydroTherapy
Wirksam. Und Einfach.



Die Fixierung von HydroTac®



1. Auswahl und Öffnen des Präparates
Wählen Sie die passende Größe der Wundauflage aus. Ziehen Sie die Schutzfolien Nr. 1 & 2 hälftig auf.



2. Anlegen des Präparates
Wenden Sie das Präparat und platzieren Sie **HydroTac®** mit der Gelstruktur zur Wunde hin.



3. Andrücken des Präparates
Drücken Sie das Präparat an und ziehen Sie im Anschluss die Schutzfolien 1 & 2 entsprechend der Nummerierung ab.



4. Fixieren des Präparates
Fixieren Sie **HydroTac®** locker mit einer auf sich selbst haftenden Binde wie z. B. **Peha-haft®**.
Bei Vorliegen eines chronischen Venenleidens legen Sie zur Fixierung eine Kurzzugbinde wie z. B. **Pütter®Flex** an. Zur Unterpolsterung* eignet sich z. B. **Rolta® soft**.

Die Fixierung von HydroTac® comfort



1. Auswahl und Öffnen des Präparates
Wählen Sie die passende Größe der Wundauflage aus. Lösen Sie Schutzfolie Nr. 1 & 2 bis der mit Gel beschichtete Schaumkörper freiliegt.



2. Anlegen des Präparates
Wenden Sie das Präparat und platzieren Sie **HydroTac® comfort** mit der Gelstruktur zur Wunde hin. Ziehen Sie im Anschluss die Schutzfolien 1 & 2 vollständig von der Mitte ausgehend ab.



3. Andrücken des Präparates
Drücken Sie den Kleberand gut fest und ziehen Sie die Schutzfolien 3 & 4 entsprechend der Nummerierung ab.



4. Anlegen eines Kompressionsverbandes
Legen Sie bei Vorliegen eines chronischen Venenleidens zusätzliche eine Kurzzugbinde wie z. B. die **Pütter®Flex** an. Zur Unterpolsterung* eignet sich z. B. **Rolta® soft**.

* Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie

Handelsformen	Außenmaß	Innenmaß	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt
HydroTac®	ø 6 cm		685 849	03451128	OP 10 Stück
	10 x 10 cm		685 832	03451312	OP 10 Stück
	10 x 20 cm		685 833	03451329	OP 3 Stück
	20 x 20 cm		685 844	03451499	OP 3 Stück
HydroTac® comfort mit Kleberand	8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	685 810	03452636	OP 10 Stück
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 815	03452688	OP 10 Stück
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 820	03452702	OP 3 Stück
	20 x 20 cm	14 x 14 cm	685 822	03452719	OP 3 Stück
HydroTac® sacral selbsthaftend	18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	685 826	03452725	OP 3 Stück

Wundverschluss mit HydroTac®

